



AutoSlide erleichtert das Ein- und Aussteigen beim Auto. Das Gerät besteht aus zwei Teilen mit gegeneinander liegenden Gleitflächen. AutoSlide ist an der Rückseite mit einem Spannband zur Befestigung an der Rückenlehne versehen. An beiden Seiten sind Griffe für evtl. Hilfspersonen vorhanden.

AutoSlide ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Umsetzungshilfsmitteln. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen.

RoMedics Produkte sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Personen. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Produktes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.




Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung

Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden, gilt folgendes:
Durch korrekte Anwendung vermeiden Sie Unbehagen.




Kontrolle der Funktion

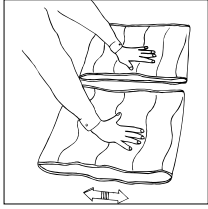

Testen Sie die „reibunglose“ Funktion des AutoSlide durch Hin- und Herschieben. Beachten Sie dabei die Gleitfähigkeit. Vergleichen Sie ggf. mit einem neuen AutoSlide.


Prüfen Sie die Funktion der Schnalle und der Griffe durch entsprechende Belastung.

Positionieren des AutoSlide

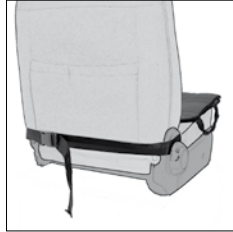

Legen Sie den AutoSlide mit der rauen Oberfläche des kleineren Teils nach unten auf den Sitz. Legen Sie das Spannband um die Rückenlehne herum und ziehen es fest an.

Anwendung von AutoSlide

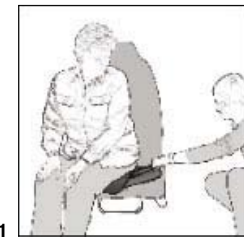

Der Benutzer setzt sich auf den Beifahrersitz und setzt sich durch Drehen und anschließendes Zurückschieben des Gesäßes im Autositz zurecht.

Eine Hilfsperson kann von der Fahrerseite aus durch Ziehen am seitlichen Griff des AutoSlide Hilfestellung leisten (2).

2 ACHTUNG! Stets Sicherheitsgurt anlegen.

Material

Polyester

Pflegeanleitung

Lesen Sie das Produktetikett.



Kein Weichspülmittel verwenden. Für optimale Lebensdauer des Materials nicht im Wäschetrockner trocknen.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die neueste Version des Handbuchs verfügen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group