




60x33, 75x33

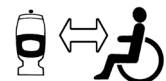

60x25, 45x20



Max: 135 kg /297 lbs

EasyGlide wird zum Umsetzen in Sitzstellung zwischen Rollstuhl, Bett, Toilette und Autositz verwendet. EasyGlide ist in verschiedenen Größen erhältlich, um den meisten Umsetzsituationen gerecht zu werden. Das kleinere Modell eignet sich für aktive Patienten, die sich selbständig umsetzen.

EasyGlide ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Umsetzungshilfsmitteln. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen. EasyGlide ist sowohl für einen Einsatz in häuslicher Umgebung, wie auch für den institutionellen Bereich geeignet. EasyGlide ist für einen Wiedereinsatz geeignet.

RoMedics Produkte sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Personen. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Produktes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.




Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung

Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden, gilt folgendes:

Durch korrekte Anwendung vermeiden Sie Unbehagen.




Kontrolle der Funktion

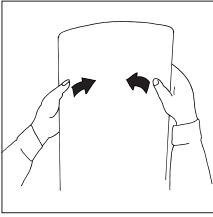


Prüfen Sie die Festigkeit von EasyGlide durch vorsichtiges Biegen der Platte. Die Platte muss elastisch und fest sein. Bei geringer Festigkeit ist EasyGlide zu entsorgen.

Max. Tragfähigkeit

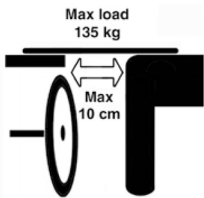


60x33, 60x25, 45x20

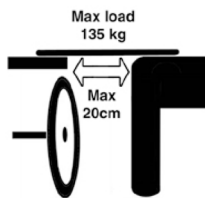

75x33

Bei max. Abstand zwischen den Auflageflächen von 10 cm bzw. 20 cm gilt ein Höchstgewicht von 135 kg. 10 cm gilt für EasyGlide 60x33, 60x25 und 45x20. 20 cm gilt für EasyGlide 75x33.

Positionieren/Entfernen von EasyGlide

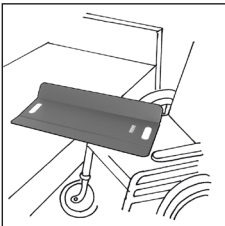

Stellen Sie den Rollstuhl schräg und so nahe wie möglich an das Bett heran. Die dem Bett zugewandte Armstütze sowie ggf. Beinstützen entfernen. EasyGlide quasi als Brücke zwischen Bett und Rollstuhl positionieren. Bei einem EasyGlide mit einer biegsamen Langseite ist diese zum Rollstuhlrاد hin zu positionieren.

Um den EasyGlide unter den Patienten schieben zu können, muss sich dieser in entgegengesetzte Richtung lehnen.



Nach beendeter Umsetzung EasyGlide durch Hochbiegen und herausziehen entfernen, siehe Abb.

Anwendung von EasyGlide



Ein aktiver Patient kann sich mit EasyGlide selbst umsetzen. Armlehne fassen und sich zum Rollstuhl hinüberlehnen. Vergessen Sie nicht, sich nach dem Umsetzen noch einmal in Richtung Bett zu beugen, um in die richtige Sitzstellung zu gleiten.




Benötigt der Patient Hilfestellung beim Umsetzen, empfiehlt es sich, EasyGlide durch EasyBelt/FlexiBelt zu ergänzen.



Die Hilfsperson kann dabei entweder vor oder hinter dem Patienten stehen.

Tip! Bringen Sie mithilfe eines Schemels oder unseres FootStool die Füße in eine höhere Position.

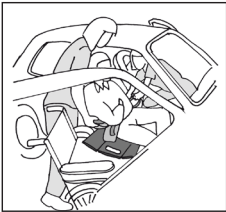

EasyGlide eignet sich auch als Hilfsmittel zum Ein- und Aussteigen beim Auto.

Indikationsstellung:

Z.B.: Gebrauchsaufhebung bzw. Funktionsausfall der Beine bei noch ausreichender Gebrauchsfähigkeit der oberen Extremitäten und erhaltener Rumpffunktion.

Reinigung:

Bei Bedarf ist EasyGlide mit warmem Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln zu reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Phenol, Chlor oder Lösungsmittel enthalten, da diese das Material beschädigen können.

Desinfektion:

Zur Desinfektion, benutzen sie handelsübliche Flächendesinfektionsmittel, die aber kein Phenol oder Chlor enthalten dürfen, da diese da diese das Material beschädigen können.

Wiedereinsatz:

EasyGlide ist für einen Wiedereinsatz geeignet.

Im Falle des Wiedereinsatzes muss EasyGlide gereinigt, desinfiziert und von einem Fachmann auf seine einwandfreie Funktion überprüft werden.

CE-Konformität

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

Material:

Polyethen

Technische Daten

	Größe:	Gewicht:
5020	60 x 33 cm	0,95 kg
5050	75 x 33 cm	1,4 kg
5060	60 x 25 cm	0,75 kg
5070	45 x 20 cm	0,4 kg

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die neueste Version des Handbuchs verfügen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group