
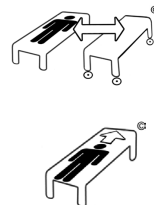


Gebrauchsanweisung

EasyGlide

SystemRoMedic

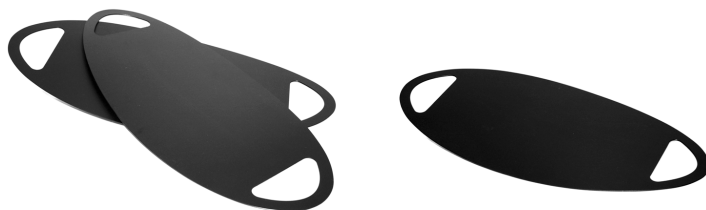

Max: 135 kg/297 lbs

EasyGlide wird beim Umsetzen im Liegen zwischen Bett und Röntgentisch/Operationstisch/Liege/Duschwagen verwendet. Anwendung von jeweils 2 Platten. Aus Sicherheitsgründen sollte EasyGlide beim Umsetzen zwischen Bett und Liege auf beiden Seiten auf einer festen Unterlage aufliegen.

SystemRoMedic ist eine Serie verschiedener Modelle von Umsetzungshilfsmitteln. Die Wahl des Hilfsmittels ist von der jeweiligen Situation sowie vom Bedarf und der Fähigkeit des Patienten abhängig.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung

Unterziehen Sie das Hilfsmittel regelmäßigen Funktionskontrollen. Prüfen Sie Material auf einwandfreien Zustand. Prüfen Sie, ob das Material abgenutzt oder verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.




Lesen Sie stets die gebrauchsanweisung

Lesen Sie unbedingt die entsprechenden Anleitungen für Hilfsmittel zur Umsetzung von Patienten. Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat. Verweilen Sie während des Umsetzmoments beim Patienten.



Kontrolle der Funktion

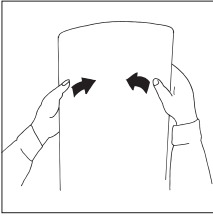


Prüfen Sie die Festigkeit von EasyGlide durch vorsichtiges Biegen der Platte. Die Platte muss elastisch und fest sein. Bei geringer Festigkeit ist EasyGlide zu entsorgen.

Sicherheit



EasyGlide muss beim Umsetzen zwischen Bett und Liege auf beiden Seiten auf einer festen Unterlage aufliegen. Höchstgewicht 135 kg bei einem Abstand der Auflageflächen von höchstens 5 cm.

Positionierung

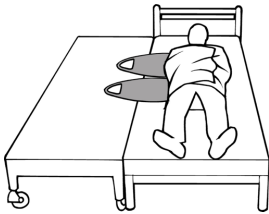


Die Gleitplatte unter Hüfte und Schultern positionieren.

Den Patienten in Seitenlage bringen; verwenden Sie ein Ziehlaken, um die Umsetzung zu erleichtern. Schieben Sie die Gleitplatte zwischen Laken und Ziehlaken unter den Patienten. Die Gleitplatte etwas in die Matratze eindrücken und schieben.

Achten Sie darauf, dass der Schwerpunkt von Hüfte und Schultern in der Mitte der Gleitplatte zu liegen kommt.


ACHTUNG: Bei Anwendung von zwei oder mehreren Gleitplatten darauf achten, dass die Haut nicht zwischen zwei Platten eingeklemmt wird.

Umsetzung zwischen zwei Betten

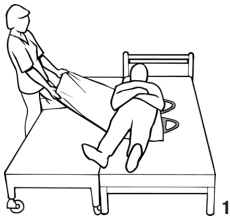

1. Umsetzen auf Gleitplatten. Die Gleitplatte in der Mitte zwischen den beiden Liegeflächen positionieren. Ein Ziehlaken dient der Pflegeperson als verlängerter Arm und ermöglicht bessere Arbeitsstellung.

Achten Sie darauf, dass die Gleitplatten in der Mitte zwischen den beiden Liegeflächen liegen und der Abstand höchstens 5 cm beträgt. Beugen Sie den Patienten zu den Gleitplatten hin und ziehen Sie am Ziehlaken, um den Patienten zu versetzen.

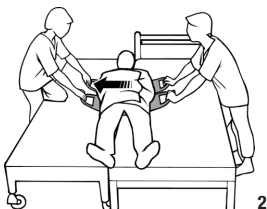


2. Die Umsetzung kann auch durch Ziehen der Gleitplatte erfolgen.

Die Gleitplatte ist mitten unter dem Patienten anzubringen.

Eine Pflegeperson zieht, während die andere durch Schieben der Gleitplatte nachhilft.

Versetzen zum Kopfende hin

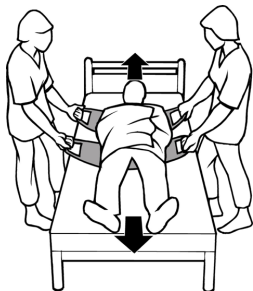

Versetzen zum Kopfende hin mithilfe zweier Gleitplatten. Die Gleitplatten unter Hüfte und Schultern des Patienten anbringen. Die Pflegepersonen stehen in Schrittstellung an beiden Seiten des Bettes, greifen die Handgriffe und treten einen Schritt nach hinten/oben.

Entfernen

Entfernen der Gleitplatten durch Fassen an den Handgriffen und Herausziehen. Um zu verhindern, dass der Körper des Patienten mitgezogen wird, empfiehlt es sich, den Patienten beim Herausziehen der Gleitplatte festzuhalten.

Reinigung:

Bei Bedarf ist EasyGlide mit warmem Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln zu reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Phenol, Chlor oder Lösungsmittel enthalten, da diese das Material beschädigen können.

Desinfektion:

Zur Desinfektion, benutzen sie handelsübliche Flächendesinfektionsmittel, die aber kein Phenol oder Chlor enthalten dürfen, da diese das Material beschädigen können

Wiedereinsatz:

EasyGlide ist für einen Wiedereinsatz geeignet.

Im Falle des Wiedereinsatzes muss EasyGlide gereinigt, desinfiziert und von einem Fachmann auf seine einwandfreie Funktion überprüft werden.

CE-Konformität

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Material:

Polyethen

Technische Daten

Größe:

85 x 39 x 0,3 cm

Gewicht:

0,5 kg

Bei Fragen zu den Produkten und ihrer Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler. Für ein komplettes Händlerverzeichnis verweisen wir auf www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die richtige Version des Handbuchs verfügen. Die neueste Version steht auf unserer Homepage www.romedic.com zum Download bereit.

RoMedic AB

Veddestav. 15, Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group