



140 x 90 cm



200 x 90 cm



Max: 180 kg/397 lbs

EasySlide wird zum Wenden des Patienten im Bett verwendet. Dieses Modell von EasySlide ist mit Spannbändern zur Befestigung am Bett versehen, so dass die Rückenlehne des Bettes erhöht werden kann, ohne Herabgleiten des Patienten zu verursachen. EasySlide wird ins Bett gelegt und verbleibt dort unter dem Patienten.

EasySlide ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Umsetzungshilfsmitteln. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen. EasySlide ist sowohl für einen Einsatz in häuslicher Umgebung, wie auch für den institutionellen Bereich geeignet. EasySlide ist für einen Wiedereinsatz geeignet.

RoMedics Produkte sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Personen. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



## Kontrolle der Funktion

### Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Produktes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.



## Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung

Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden, gilt folgendes:  
Durch korrekte Anwendung vermeiden Sie Unbehagen.

## Technische Daten


Größe:	Gewicht	max. zul. Belastung
1420 140 x 90	1,40 kg	180 kg
1470 200 x 90	2,00 kg	180 kg

## CE-Konformität

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.



## Testen der Gleitfunktion

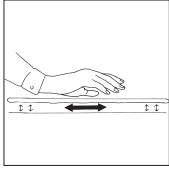


Testen Sie die „reibunglose“ Funktion von EasySlide durch Hin- und Herschieben. Beachten Sie dabei die Gleitfähigkeit. Vergleichen Sie ggf. mit einer neuen EasySlide-Matte.

## Positionieren von EasySlide

Die Gleitmatte mit der Befestigungsvorrichtung oben am Kopfende anbringen. Legen Sie ein Laken quer über die Gleitmatte und stecken Sie es zum Umsetzen zum und vom Bett sowie zum Positionieren des Patienten an beiden Seiten des Bettes unter die Matratze ein.

## Anwendung

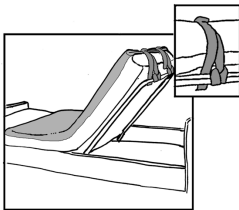

Vor dem Erhöhen des Bettrückens die Bänder spannen und beim Absenken des Bettes die Bänder lösen.



Durch Ziehen am Laken, das auf dem EasySlide liegt, den Patienten wenden. Nach dem Wenden das Laken an beiden Seiten einstecken.

## Zu beachten



Achten Sie auf die Gefahr des Abgleitens des Patienten. Den Patienten nur allein lassen, wenn die Sicherheitsseiten des Bettes hochgeklappt sind.

## Desinfektion:

Zur Desinfektion, benutzen sie handelsübliche Desinfektionsmittel, die aber kein Phenol oder Chlor enthalten dürfen, da diese das Material beschädigen können

## Wiedereinsatz:

EasySlide ist für einen Wiedereinsatz geeignet. Im Falle des Wiedereinsatzes muss EasySlide gereinigt, desinfiziert und von einem Fachmann auf seine einwandfreie Funktion überprüft werden. Spannbändern

Modelle	Größe	Überzug
1420	140 x 90	1451
1470	200 x 90	1481

Kombination	Zubehör
1430 = 1420 + 1451	1599
1480 = 1470 + 1481	

## Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett.



Kein Weichspülmittel verwenden. Für optimale Lebensdauer des Materials nicht im Wäschetrockner trocknen.

## Material:

Polyester, Mikrofasern, Polyamid

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder [www.romedic.com](http://www.romedic.com). Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die neueste Version des Handbuchs verfügen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

E-mail: [office@romedic.com](mailto:office@romedic.com)

**RoMedic**<sup>®</sup>  
A company in the Handicare Group