

20x60 cm

20x50 cm



FlexiMove wird als Stütze und Hilfsmittel bei verschiedenen Umsetzungsarten verwendet. FlexiMove wird gewöhnlich zum Verlegen von einer Liege zur anderen, beim Aufsetzen und Höhersetzen im Bett zum Einsatz gebracht. FlexiMove besitzt zwei verschiedene Griff­längen, um eine gute Arbeitsstellung zu bieten. Herstellung mit zwei Materialien an der Innenseite, Nylon und Polyester. Nylon ist ein rutschfestes Material, das bei Bedarf leicht einer Oberflächen­desinfektion unterzogen werden kann. Polyester ist weich und angenehm am Körper.

FlexiMove ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Umsetzungs­hilfsmitteln. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen. FlexiMove ist sowohl für einen Einsatz in häuslicher Umgebung, wie auch für den institutionellen Bereich geeignet. FlexiMove ist für einen Wiedereinsatz geeignet.

RoMedics Produkte sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Personen. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Produktes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.



Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung

Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden, gilt folgendes:

Durch korrekte Anwendung vermeiden Sie Unbehagen.







Funktionstest von FlexiMove



Unterziehen Sie FlexiMove regelmäßig einer Funktionsprüfung durch Einsetzen eines Fußes in einen Griff und Ziehen am anderen Griff in entgegengesetzte Richtung. Wiederholen Sie diese Prozedur mit sämtlichen Griffen.

Anwendung von FlexiMove

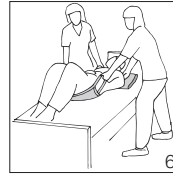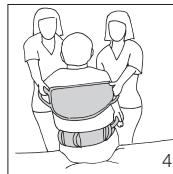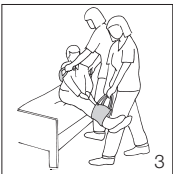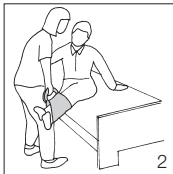

Umlagern:

Beim Umsetzen zwischen beispielsweise Rollstuhl und Bett bietet sich zudem die Anwendung von EasyGlide und einem EasyBelt/FlexiBelt an (1).

Aufstehen:

Beim Aufstehen kann FlexiMove benutzt werden, um die Beine über die Bettkante zu bewegen (2) und anschließend als Stütze hinter dem Rücken/Gesäß (4).

Benötigt der Patient zwei Hilfspersonen, kümmert sich die eine Person um die Beine und die andere um den Oberkörper (3). Beim Aufstehen stehen die Hilfspersonen jeweils an der Seite und greifen die am besten geeigneten Griffe (4).

Versetzen zum Kopfende hin:

Um den Patienten zum Kopfende hin zu versetzen wird FlexiMove unter das Gesäß geschoben (5).

Auch die Verwendung eines reibungsmindernden Hilfsmittels unter den Schultern, z.B. EasySlide kann von Vorteil sein. (6).

Material:

Polyamid, nylon/polyester

CE-Konformität:

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Desinfektion:

Zur Desinfektion, benutzen sie handelsübliche Desinfektionsmittel, die aber kein Phenol oder Chlor enthalten dürfen, da diese das Material beschädigen können

Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett.



Kein Weichspülmittel verwenden.
Für optimale Lebensdauer des Materials nicht im Wäschetrockner trocknen.

Technische Daten

	Größe	Gewicht	max. zul. Belastung
3012	20 x 60 nylon	0,50 kg	150 kg
3020	20 x 50 polyester	0,55 kg	150 kg
3030	20 x 60 polyester	0,55 kg	150 kg

Wiedereinsatz:

FlexiMove ist für einen Wiedereinsatz geeignet.
Im Falle des Wiedereinsatzes muss FlexiMove gereinigt, desinfiziert und von einem Fachmann auf seine einwandfreie Funktion überprüft werden.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die neueste Version des Handbuchs verfügen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group