



IncoSheet ist ein waschbarer Inkontinenzschutz zum Anbringen im Bett auf der vorhandenen Betausstattung oder als Schutz auf dem Rollstuhlkissen. Das Material weist gute Absorptionseigenschaften auf und verteilt die Flüssigkeit über eine größere Fläche. Durch den Stoff an der Oberseite des Produktes fühlt sich die Oberfläche trocken an und bietet eine angenehme Liegeauflage. Durch die raue Stoffunterseite wird ein Verrutschen im Bett verhindert.

IncoSheet ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Umsetzungshilfsmitteln. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen.

RoMedics Produkte sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Personen. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzten, Positionieren, Stützen und Heben.



## Kontrolle der Funktion

---

### Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Produktes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.



## Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung

---

Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden, gilt folgendes:  
Durch korrekte Anwendung vermeiden Sie Unbehagen.

## Anbringen von IncoSheet



75x90 cm


IncoSheet wird mit der gesteppten, helleren Seite nach oben auf das Bett gelegt. IncoSheet ist in vier verschiedenen Größen erhältlich; zwei Modelle mit kürzerem Inkontinenzschutz, von denen ein Modell an den Seiten mit Stoff besetzt ist, um unter die Matratze eingesteckt werden zu können, und ein Modell mit längerem Inkontinenzschutz. Hinzu kommt eine kleinere Größe für Anwendung im Rollstuhl.

Die beiden Modelle mit kürzerem Inkontinenzschutz sind in erster Linie für Anwender vorgesehen, die sich selbst umdrehen können, aber auch in Situationen, in denen Hilfe erforderlich ist und zwar mit einem Umsetzungshilfsmittel an der Oberseite. Durch Anwendung des Umsetzungshilfsmittels auf dem IncoSheet behält dies während und nach dem Wenden unter dem Anwender seine Position und somit seine Schutzfunktion bei.



75x200 cm

IncoSheet mit dem langen Inkontinenzteil eignet sich besonders für Anwender, die beim Umdrehen auf Hilfe angewiesen sind. Dieses Model von IncoSheet kann auf ein Umsetzungshilfsmittel aufgelegt werden, da der Kontinenzteil extra lang ist und auch nach dem Wenden Schutz bietet.

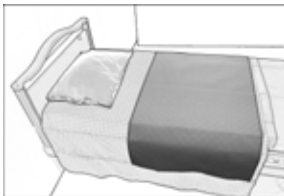

75x150 cm

IncoSheet 40x83 lässt sich aufgrund der kompakten Maße im Rollstuhl oder zum Schutz von Sitzkissen verwenden.



40x83 cm

## Achtung!

IncoSheet ist nicht kräftig genug, um als Ziehdecken benutzt zu werden, sondern wird auf das Bettuch, ein Ziehdecken oder ein Umsetzungshilfsmittel aufgelegt.

## Material:

Polyester, baumwollen

## Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett.



IncoSheet kann bei hoher Temperatur gewaschen und getrocknet werden.

Keine Spül- oder Bleichmittel (z.B. chlorhaltige Mittel) verwenden.

IncoSheet kann mehr als 100 Mal gewaschen werden.

## Größe:

1530	75 x 90
1531	75 x 200 mit Stoff
1532	75 x 150
1533	40 x 83

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder [www.romedic.com](http://www.romedic.com). Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die neueste Version des Handbuchs verfügen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

E-mail: [office@romedic.com](mailto:office@romedic.com)

**RoMedic**<sup>®</sup>  
A company in the Handicare Group