



Max: 150 kg/330 lbs

OneWaySlide wird verwendet, um den Patienten im Stuhl/Rollstuhl zurückzusetzen. OneWaySlide ist so konstruiert, dass Gleiten nach hinten möglich ist, aber nicht nach vorn. Es verbleibt unter dem Patienten im Rollstuhl. OneWaySlide kann aber auch im Bett verwendet werden, wenn der Patient z.B. im Sitzen zum Fußende rutscht.

OneWaySlide ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Umsetzungshilfsmitteln. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen. OneWaySlide ist sowohl für einen Einsatz in häuslicher Umgebung, wie auch für den institutionellen Bereich geeignet. OneWaySlide ist für einen Wiedereinsatz geeignet.

RoMedics Produkte sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Personen. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Produktes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.




Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung

Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden, gilt folgendes:
Durch korrekte Anwendung vermeiden Sie Unbehagen.



Kontrolle der Funktion

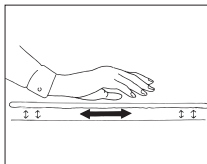

Testen Sie die „reibunglose“ Funktion von OneWaySlides durch Hin- und Herschieben. Beachten Sie dabei die Gleitfähigkeit. Prüfen Sie auch die Bremsfunktion in entgegengesetzter Richtung. Vergleichen Sie ggf. mit einem neuen OneWaySlide.

Positionierung von OneWaySlide



Vergewissern Sie sich, dass OneWaySlide sicher auf dem Sitzkissen liegt. Ein raues Material auf der Oberseite des Sitzkissens begünstigt die Funktion.

Positionieren Sie OneWaySlide entsprechend dem Pfeil auf dem Etikett, so dass an der Vorderkante ein Überhang von etwa 10 cm entsteht.

ACHTUNG! Positionieren Sie OneWaySlide laut Anleitung auf dem Etikett. Falsche Positionierung erhöht die Abgleitgefahr.



Anwendung von OneWaySlide



Ist der Patient im Rollstuhl nach vorn gerutscht, kann er sich mit oder ohne Hilfsperson nach vorn beugen und sich wieder nach hinten drücken.

Achten Sie dabei darauf, dass die Knie in Höhe der Hüften zu liegen kommen. Verwenden Sie z.B. FootStool.

Technische Daten

	Größe	Gewicht	max. zul. Belastung
2069	50 x 40	0,30 kg	135 kg
2070	50 x 45	0,45 kg	135 kg

Material:

Polyester, polyamid, bomull

CE-Konformität

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Kein Weichspülmittel verwenden.
Für optimale Lebensdauer des Materials nicht im Wäschetrockner trocknen.

Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett.



Desinfektion:

Zur Desinfektion, benutzen sie handelsübliche Desinfektionsmittel, die aber kein Phenol oder Chlor enthalten dürfen, da diese das Material beschädigen können.

Wiedereinsatz:

OneWaySlide ist für einen Wiedereinsatz geeignet. Im Falle des Wiedereinsatzes muss OneWaySlide gereinigt, desinfiziert und von einem Fachmann auf seine einwandfreie Funktion überprüft werden.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die neueste Version des Handbuchs verfügen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group