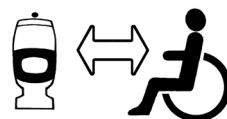
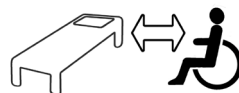


TurnTable

SystemRoMedic

**Max:**

5083: 135 kg/297 lbs

5084: 250 kg/551 lbs

5085: 135 kg/297 lbs

TurnTable kann zusammen mit FlexiBelt/EasyBelt zum Umsetzen in sitzender Stellung zwischen Rollstuhl und Bett, Toilette oder Stuhl/Sessel verwendet werden. Aus Sicherheitsgründen sollte TurnTable stets in Verbindung mit FlexiBelt/EasyBelt benutzt werden. TurnTable ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich, mit Griff für praktischen Transport bzw. ohne Griff für Anwendung auf engem Raum. TurnTable ist sowohl für einen Einsatz in häuslicher Umgebung, wie auch für den institutionellen Bereich geeignet. TurnTable ist für einen Wiedereinsatz geeignet.

TurnTable ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Umsetzungshilfsmitteln. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen.

RoMedics Produkte sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Personen. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Produktes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.



Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung

Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden, gilt folgendes:
Durch korrekte Anwendung vermeiden Sie Unbehagen.

Besondere Vorschriften und Voraussetzungen

Für eine Umsetzung mit TurnTable muss der Benutzer;

- die Beine belasten können
- sich erheben und im Gleichgewicht bleiben können (evtl. mit Stütze)
- die Anweisungen verstehen

Anbringen und Anwendung von TurnTable



TurnTable neben dem Patienten auf den Fußboden legen. TurnTable beim Aufstehen sichern, indem Sie auf die Kante der Drehscheibe treten, mit der Ferse am Fußboden und dem Fußballen auf der Scheibe. Die Hilfsperson kann die Drehung mit dem vorderen Teil des Fußes steuern und mit der Ferse abbremsen. TurnTable wie vorstehend sichern, wenn sich der Patient hinsetzt.



Beim Umsetzen vom Bett in den Rollstuhl den Rollstuhl so nahe wie möglich an das Bett heranfahren, um die Strecke so kurz wie möglich zu halten.



Beim Umsetzen auf die Toilette den Rollstuhl so nahe wie möglich an die Toilette heranfahren, um die Strecke möglichst kurz zu halten. Die Hose lässt sich herunter- und hochziehen, wenn sich der Patient erhoben hat. Arbeiten Sie möglichst zu zweit.

Reinigung: TurnTable von Hand mit handelsüblichen Reinigungsmitteln reinigen.

Desinfektion: Zur Desinfektion, benutzen sie handelsübliche Oberflächendesinfektionsmittel, die aber kein Phenol oder Chlor enthalten dürfen, da diese das Material beschädigen können

Wiedereinsatz: TurnTable ist für einen Wiedereinsatz geeignet. Im Falle des Wiedereinsatzes muss TurnTable gereinigt, desinfiziert und von einem Fachmann auf seine einwandfreie Funktion überprüft werden.

CE-Konformität: Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

Technische Daten

	Größe	Gewicht	max. zul. Belastung
5083	ø 38 cm	0,9 kg	135 kg
5084	ø 45 cm, mit Griff	1,3 kg	250 kg
5085	ø 38 cm, mit Griff	1,0 kg	135 kg

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die neueste Version des Handbuchs verfügen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group