

Max: 100 kg/220 lbs

WendyLean ist ein Kissenbezug mit Gleitfläche an der Unterseite und Griffen an beiden Seiten. Die Gleitfläche erleichtert die Positionierung des Kissens. WendyLean erleichtert das Hochrutschen zum Kopfende hin, da das Kissen leicht auf der Unterlage gleitet und eignet sich mithilfe der Griffen zum Aufsetzen an der Bettkante.

WendyLean ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Umsetzungshilfsmitteln. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen.

RoMedics Produkte sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Personen. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Produktes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.



Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung

Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden, gilt folgendes:

Durch korrekte Anwendung vermeiden Sie Unbehagen.





Kontrolle der Funktion





Prüfen Sie regelmäßig Nähte und Bänder auf einwandfreien Zustand. Testen Sie die Funktion durch entsprechende Belastung. Treten Schäden auf, muss das Produkt verworfen werden.

Positionierung

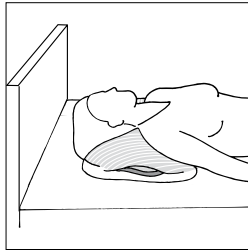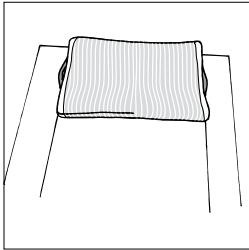

Beziehen Sie ein Kissen mit dem Bezug. Die glatte Fläche muss im Bett an der Unterseite zu liegen kommen (1). Zur Benutzung der Griffe das Kissen so anbringen, dass die Griffe über den Schultern liegen (2)

Anwendung

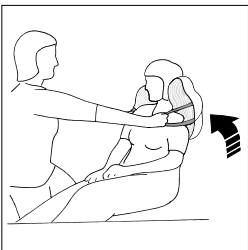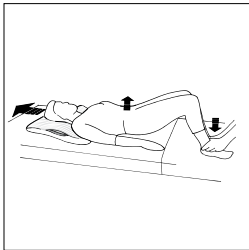

Zum Hochschieben im Bett die Beine anziehen, den Beckenbereich anheben und sich hochschieben (3) WendyLean eignet sich als Stütze an Hinterkopf/ Schulterpartie und als Hilfsmittel für die Hilfsperson zum Aufsetzen des Anwenders. Die Hilfsperson hält hierbei das Kissen an den Griffen (4).

Material:

Polyester, baumwolle, satin

Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett.



Kein Weichspülmittel verwenden.
Für optimale Lebensdauer des Materials nicht im Wäschetrockner trocknen.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die neueste Version des Handbuchs verfügen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group