

WendyLett 2Way  
 90x180 100x200  
 140x200



WendyLett 4Way  
 140x200 200x200



WendyLett2Way und 4Way sind zwei Ziehlisten zur Anwendung zusammen mit einem Gleitlaken, WendyLett. WendyLett 2Way wird zum seitlichen Versetzen verwendet und WendyLett 4Way sowohl zum seitlichen Versetzen als nach oben bzw. unten. WendyLett 4Way ist an der Unterseite mit einer Gleitschicht versehen und ist vor allem für schwere Benutzer vorgesehen. In verschiedenen Größen erhältlich.

WendyLett2Way und 4Way ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Umsetzungshilfsmitteln. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen.

RoMedics Produkte sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Personen. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



## Kontrolle der Funktion

### Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Produktes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.




## Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung

Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden, gilt folgendes:


Durch korrekte Anwendung vermeiden Sie Unbehagen.

## Positionierung

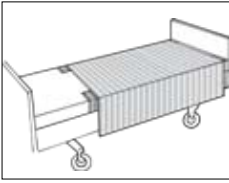

WendyLett 2Way

WendyLett wird mit der glatten Seite auf die Bettmitte gelegt mit WendyLett2Way obenauf. Nach der Anwendung wird WendyLett2Way an beiden Seiten des Bettes unter die Matratze eingesteckt, um ein weiteres Gleiten zu verhindern.

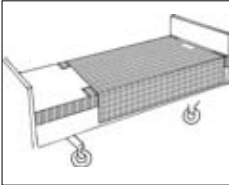

WendyLett 4Way

WendyLett 4Way ist mit einer Kennzeichnung versehen, aus der hervorgeht, welche Seite oben oder unten ist. Nach der Anwendung wird WendyLett4Way an beiden Seiten des Bettes unter die Matratze eingesteckt, um ein weiteres Gleiten zu verhindern.

## Wenden mit WendyLett 2Way



Zum Wenden das Ziehlaken in Hüft- und Schulterhöhe fassen. Fülliges Greifen des Lakens verbessert die Ergonomie.



Arbeiten Sie mit geraden Handgelenken und lehnen Sie sich zur Kraftübertragung nach hinten.



Für die Wendebewegung mit Ziehlaken empfehlen sich zwei Hilfspersonen. Dabei zieht eine Person am Ziehlaken (siehe oben), während die andere Person im Hüft- und Schulterbereich schiebend nachhilft.



Den Benutzer wenden. Nach dem Wenden das Ziehlaken an beiden Seiten unter die Matratze stecken, um weiteres Gleiten zu vermeiden.

## Wenden mit WendyLett 4Way



Das Ziehlaken WendyLett4Way mit Gleitbeschichtung an der Unterseite ist besonders für schwergewichtige Benutzer vorgesehen. Die Vorgehensweise beim Wenden ist die gleiche wie bei WendyLett2Way (siehe oben).



Nach dem Wenden das Ziehlaken an beiden Seiten unter die Matratze stecken, um weiteres Gleiten zu vermeiden. Vor dem Einstecken des Ziehlakens unter die Matratze eventuelle Unebenheiten unter dem Patienten glätten, um Scheuerstellen zu vermeiden. Hierzu das Ziehlaken von beiden Seiten her diagonal glatt ziehen. Bevor Sie den Patienten verlassen, sind die Schutzgitter des Bettes hochzuklappen.

## Hochschieben im Bett mit WendyLett 4Way



Um den Patienten im Bett zum Kopfende hin zu verschieben, fassen Sie das Ziehlaken in Schulterhöhe des Patienten und tun einen Schritt nach hinten.



Um Nachuntengleiten im Bett zu vermeiden, kann das Ziehlaken umgeschlagen werden, so dass es unter dem Gesäß des Patienten doppelt liegt.

## Aufsetzen im Bett mit WendyLett 4Way



1



2

Mit WendyLett4Way vermeiden Sie ein Nachuntengleiten des Patienten auch in sitzender Stellung im Bett. Schlagen Sie einen Teil des Ziehlakens um, so dass es unter dem Gesäß des Patienten doppelt zu liegen kommt (1). Stecken Sie danach das Ziehlaken unter die Matratze ein, jedoch nur in Höhe der Hüfte (2). Beim Erhöhen des Kopfendes des Bettes dient das Ziehlaken als Bremsfläche (3).



3

## Aufsetzen an der Bettkante mit WendyLett 4Way



Das Ziehlaken WendyLett4Way lässt sich auch als Hilfsmittel zum Aufsetzen des Patienten an der Bettkante benutzen. Das Kopfende des Bettes hochfahren.




Fassen Sie das Ziehlaken an beiden Seiten des Patienten kurz unterhalb der Achselpartie. Füllen Sie die Hand mit soviel Stoff wie möglich. Eine Hilfsperson hält die Füße des Patienten beim Herumdrehen und Aufsetzen.

## Material



1

1. Das Gleitlaken WendyLett besteht aus grauem Material mit weißen Rändern. Die Ränder liegen in Gleitrichtung.

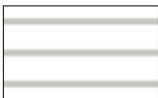

2

2. Das Ziehlaken WendyLett 2Way besteht aus weißem Material mit grauen Rändern. Die Ränder liegen in Zugrichtung.



3

3. Das Ziehlaken WendyLett 4Way ist grau kariert mit Gleitschicht an der Unterseite. Die Ränder liegen in Zugrichtung.

## Zu beachten



Beachten Sie die Gefahr des Herausgleitens. Bevor Sie den Patienten verlassen, sind die Schutzgitter des Bettes hochzuklappen.

## Material:

Polyester, baumwollen, satin

## Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett.



Kein Weichspülmittel verwenden.

Für optimale Lebensdauer des Materials nicht im Wäschetrockner trocknen.

## Größe:

1620	90 x 180 2Way (weiss)
1631	100 x 200 2Way
1636	140 x 200 2Way
1637	140 x 200 4Way
1647	200 x 200 4Way

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder [www.romedic.com](http://www.romedic.com). Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die neueste Version des Handbuchs verfügen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

E-mail: [office@romedic.com](mailto:office@romedic.com)

**RoMedic**<sup>®</sup>  
A company in the Handicare Group