

RoMedicClips erleichtern das Positionieren des Anwenders. Sie lassen sich mit allen Ziehlacken und den meisten Hehebügeln verwenden. RoMedicClips werden paarweise verwendet und an beiden Seiten des Hehebügels angesetzt.

RoMedicClips sind Teil einer Serie verschiedener Modelle von Hebegurten und Hebezubehör. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Funktionen des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen.

Die Hebegurte und Heber von RoMedics sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Patienten. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.

Kontrolle der Funktion


Sichtprüfung
Unterziehen Sie das Produkt regelmäßigen Funktionskontrollen. Vergewissern Sie sich, dass das Material unbeschädigt ist.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung


Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden gilt folgendes:

Verweilen Sie während des Positionierungsmoments beim Anwender. Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Aufhängeschlingen am Hehebügel angebracht sind. Prüfen Sie die korrekte Befestigung des Hehebügels sowie die Funktion der Aushachsicherung.

Anwendung der RoMedicClips

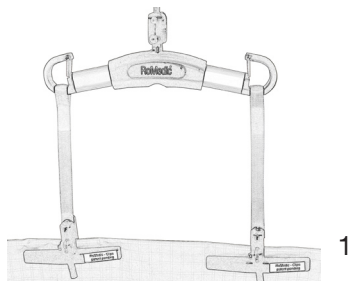

1. Zunächst RoMedicClips am Hebebügel anbringen, indem Sie die Aufhängeschlingen an den Haken des Hebebügels einhaken. Falten Sie das Ziehlaken dort, wo der Clip angebracht werden soll.

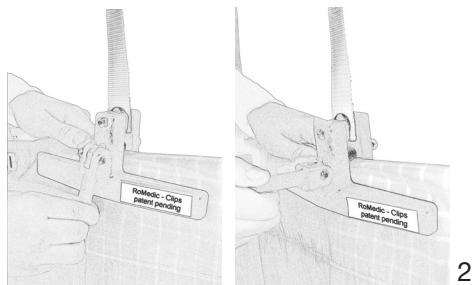

2. Vor der Positionierung ein Stück der Seite des Ziehlakens in die Öffnung der Clips einführen. Clip so nahe wie möglich dem Anwender ansetzen, vor allem bei geringer Hubhöhe. Das Ziehlaken in den Clips festklemmen, indem der Sperrhebel von offener Stellung in die gesperrte Lage gezogen wird. Die Klemmbreite zwischen den Clips wird durch Drehen des Sperrhebels geregelt.



3. Fahren Sie den Heber hoch, wenn der Anwender bereit ist für die Positionierung. Seien Sie aufmerksam während der Prozedur und brechen Sie den Vorgang ab, wenn etwas nicht in Ordnung zu sein scheint. Positionierung beenden, wenn der Anwender in der gewünschten Lage ist.

Pflegeanleitung:

Bei Bedarf RoMedicClips mit warmem Wasser oder Spiritus reinigen.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die neueste Version des Handbuchs verfügen. Sie steht auf unserer Homepage <http://www.romedic.com/manuals.htm> zum Download bereit.

RoMedic AB

Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33
Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com
E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]