

Maks: 150kg



RoMedic LiftSeat er en løftesele tilpasset manuelle løft. Den er enkel å sette på for medhjelperen, samtidig som den gir brukeren trygghetsfølelse ved manuelle løft i sittende posisjon. Den er utformet med løftehemper som innebærer at brukeren ikke sitter i selen, men får støtte fra halebeinet og opp til skuldrene samt under beina. RoMedic LiftSeat er laget for å bistå i de vanligste manuelle løftesituasjoner og ved sittende stilling som f. eks fra rullestol til flysete etc.

RoMedic LiftSeat finnes i to justerbare størrelser og inngår i en serie ulike forflytningshjelpemidler. Valget av produkt bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå og til hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i. RoMedic LiftSeat, RoMedics løfteseler og løftere inngår i SystemRoMedic som innebærer et helhetssyn om forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av RoMedic LiftSeat. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt fritt for skader og at det ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.




Les bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning.

Vær nøye med valg av størrelse på løfteselen. Ved for stor løftesele er risikoen stor for at brukeren kan gli ut av selen.

Beskrivelse av LiftSeat:

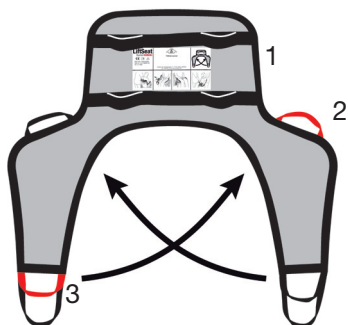


1. LiftSeat har håndtak i to seksjoner på ryggstøtten. Velg det håndtaket som gir den beste arbeidsstillingen.

2. Det røde håndtaket nede på beinstøtten skal møte det røde håndtaket på motsatt side ved montering. Tilsvarende gjøres på motsatt side med de sorte håndtakene.


3. Nederst på beinstøttene er det to håndtak. For mindre brukere velg det håndtaket som er innerst. (rødt/sort) og det ytterste (grått) håndtaket for større brukere.

Plassering av LiftSeat når brukeren sitter i rullestol eller seng:

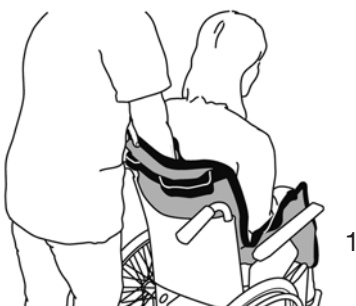

1. Hold LiftSeat i den ene hånden og plasser den andre hånden ved nedre kant av selen. Er det muligheter for at brukeren lener seg fremover, vil dette forenkle monteringen av selen. Før ned løfteselen bak ryggen på brukeren ved å la den gli ned via stolryggen/rullestolryggen/sengen mot halebeinet for optimal effekt.

Vær nøye med å få løfteselen godt ned under setet på brukeren. Sitter brukeren i rullestol, benytt plassen man har i hjørnene bak sitsen.

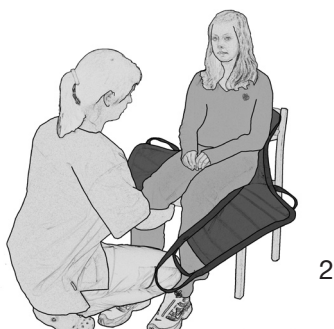


2. Trekk frem beinstøttene fra lårets utside. Sitt gjerne foran og dra frem den nedre kanten på beinstøttene, slik at løfteselen glir på plass rundt setet. Lett motstand mot brukerens kne hindrer at brukeren glir fremover i stolen.



3. Når du har kontrollert at beinstøttene er like lange på begge sider, plasserer du dem under brukerens lår. Begge beinstøttene skal ligge under begge beina til brukeren.

Ved overflytning eller løft:

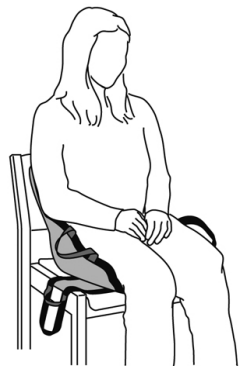

1





2

1. Velg håndtak: På løftehempene finnes to alternative håndtak. Velg passende håndtak etter brukers bredde.

2. Bak finnes håndtak på to nivåer. Velg det håndtaket som gir den beste arbeidsstillingen.

Planlegg forflytningen slik at løftesekvensen blir så kort som mulig.

Ulike plasseringer ved løftet:

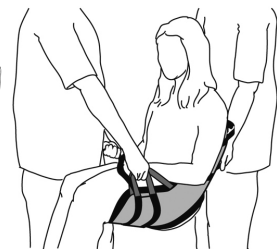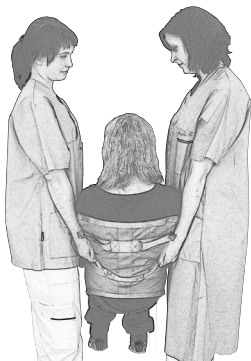


1

2

1. En medhjelper på hver side.

2. En medhjelper foran og en medhjelper bak.


Fjerning av løfteselen mens brukeren sitter:

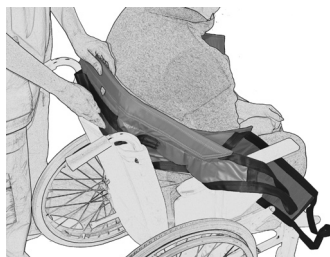

Brett sammen beinstøttene og la de gli mot seg selv når du trekker dem ut på utsiden av låret.

Trekk deretter opp løfteselen bak brukers rygg.

For ekstra støtte bak ryggen kan man plassere LiftSeat ved hjelp av EasyGlide:

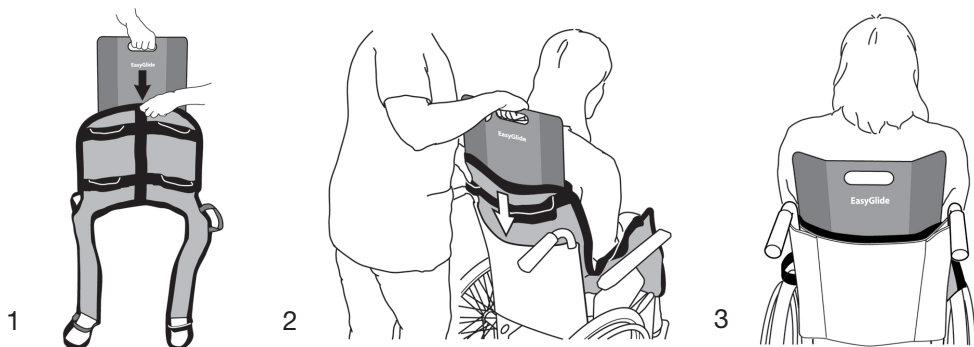

1. Plasser EasyGlide i lommen på LiftSeat.
2. Før ned LiftSeat bak brukerens rygg ved hjelp av EasyGlide.
3. La EasyGlide bli værende bak brukerens rygg for ekstra støtte gjennom hele forflytningen.

Materiale:

Polyamid: Slitesterkt materiale med lite friksjon.

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

Storlek	M/Gul	L/Gr ø n
Anbefalt lbs	80-190	180-260
Brukervekt kg	35-90	80-120

For spørsmål om produktet ta kontakt med din representant fra RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com/manuals.htm>

RoMedic AB

Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33
Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com
E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]