



RoMedicClips forenkler posisjonering av brukeren. De er laget slik at de kan benyttes sammen med samtlige trekkklaken og de fleste løftebøyler. RoMedicClips brukes alltid som par og plasseres på hver side av løftebøylen.

RoMedicClips inngår i SystemRoMedic, et helhetssystem på forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Kontroller at materialet er helt og fritt for skader.



Les alltid bruksanvisningen

Les alltid bruksanvisningen for samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning.

La aldri brukeren være alene under posisjoneringsmomentet.


Kontroller at samtlige løftebånd er korrekt montert på løftebøylen.

Kontroller festeanordningen på løftebøylen og at avkrokningsvernets funksjon er korrekt montert.

Brukerveiledning for RoMedicClips



1. Plasser RoMedicClips på løftebøylen ved å feste løftebåndene på løftebøylenes kroker.

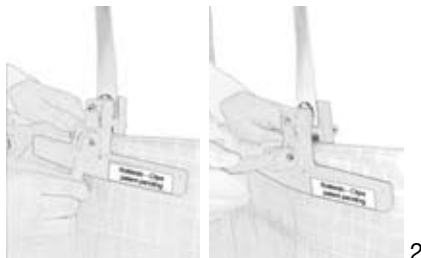

2. Fold trekkklakenet der man ønsker å feste klipsene, tre det inn i åpningen på klipsset. Plasser klipsene så nær brukeren som mulig, spesielt ved lav løftehøyde. Klyp fast trekkklakenet ved å sette låsehendelen til låst stilling. Åpningen i klipsset justeres ved å snurre låsehendelen.



3. Hev løfteren når brukeren er klar for posisjonering. Vær oppmerksom under hele posisjoneringsmomentet og avbryt prosessen hvis noe virker unormalt. Avslutt posisjoneringen når brukeren er i ønsket leie.

Vedlikeholdsråd:

Ved behov rengjøres RoMedicClips med varmt vann og desinfisering/vaskesprit.

RoMedics produkter utvikles kontinuerlig. Derfor forbeholder vi oss retten til endringer i produktene uten varsel i forkant. Kontakt leverandøren for informasjon, råd og eventuelle oppdateringer.

For spørsmål om produktet ta kontakt med Handicare for utprøving, råd eller annen informasjon. Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.handicare.no. Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: www.handicare.no

Produsent:

RoMedic AB
Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN
Tel: +46 (0)8-594 773 33
Faks: +46 (0)8-594 773 44
E-post: office@romedic.com
www.romedic.com

Leverandør:

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss
Tel: 03250
Faks: 85 02 88 22
E-post: post@handicare.no
www.handicare.no

RoMedic®