

Scale700 er en personvekt som festes på personløfteren. Den monteres over løftebøylen for enkelt å kunne veie brukeren under løftet. Den kan brukes både på mobile og stasjonære løftere.

Måleverdiene vises i et display med store tydelige sifre for enkel avlesning. Scale700 er dimensjonert for veiinger fra 4 til 300 kg.

Scale700 inngår i en serie av ulike modeller av løfteseler og løftetilbehør. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke løftesituasjoner den skal benyttes i.

Maks belastning: 300 kg

RoMedics løfteseler og løftere inngår i SystemRoMedic, en hel-hetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Kontroller at materialet er helt og uskadd.



Les alltid bruksanvisningen

Les alltid bruksanvisningen for samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. La aldri brukeren være alene under oppreisningsmomentet. Kontroller at samtlige løftestopper er korrekt montert på løftebøylen. Kontroller at festene på vekten, løftebøylen og avkrokningsvernet er korrekt påsatt.

Montering av Scale700 på en mobil- eller stasjonær løfter:




Fest først adapteret på løftebåndet eller løftearmen. Monter så Scale700 på adapteret ved hjelp av en umbraconøkkel og en skiftenøkkel.

Kontroller at samtlige mutre er ordentlig dratt til.

Bruk nå løfteren som vanlig for å forflytte brukeren.

Veiging med Scale700:

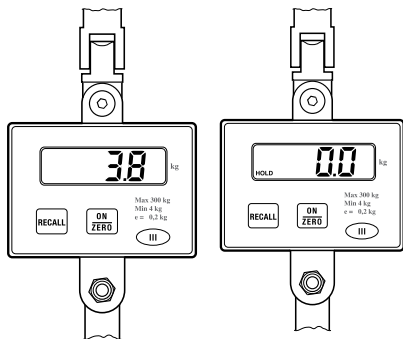


Nullstilling med løftesele og løftebøyle:
Heng løfteselen som brukeren skal benytte for veiging på løftebøylen uten belastning. Trykk på startknappen (on/zero). Da viser vekten den sammenlagte vekten på løftebøylen og løfteselen. Etter dette nullstiller vekten seg og "0.0" samt "hold" vil vises nede i det venstre hjørnet i displayet. Vekten er nå nullstilt sammen med løftebøylen og løfte-selen.

Veiging av brukere:

Plasser løfteselen korrekt på brukeren (les brukersanvisningen for løfteselen). Fest løfteselens hemper på løftebøylen og start løftet. Om vekten har slått seg av, trykk igjen på startknappen (on/zero). Når brukeren har lettet fra underlaget og kommet i ro, vil vekten vises i displayet.

Når veiingen er over senkes ned brukeren ned på passende plass.

Bytte av batteri:

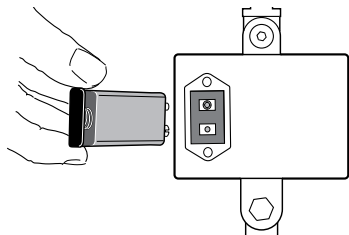

Batteribytte skjer på baksiden av vekten med et 9V batteri. Løft opp den sorte batteriluken og ta ut beholderen der batteriet sitter. Bytt batteriet og sett inn beholderen igjen.

Vedlikeholdsråd:

Ved behov, rengjøres Scale700 med varmt vann eller vaskesprit.

RoMedics produkter utvikles kontinuerlig. Derfor forbeholder vi oss retten til endringer i produktene uten varsel i forkant. Kontakt leverandøren for informasjon, råd og eventuelle oppdateringer.

For spørsmål om produktet ta kontakt med Handicare for utprøving, råd eller annen informasjon. Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.handicare.no. Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: www.handicare.no

Produsent:

RoMedic AB
Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN
Tel: +46 (0)8-594 773 33
Faks: +46 (0)8-594 773 44
E-post: office@romedic.com
www.romedic.com

Leverandør:

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss
Tel: 03250
Faks: 85 02 88 22
E-post: post@handicare.no
www.handicare.no

RoMedic