
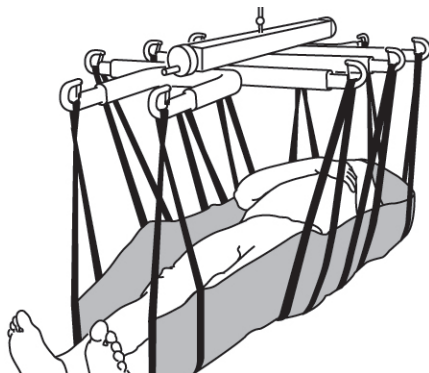


StretcherSling

SystemRoMedic

Manual

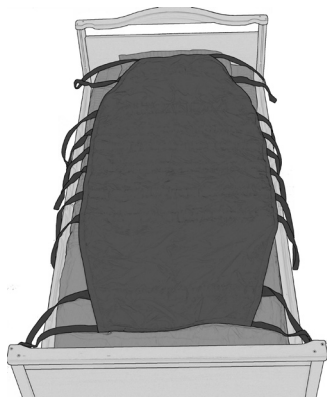

Maks belastning: 300 kg



StretcherSling er en løftesele som sammen med en spesielt utformet løftebøyle, StretcherBar, benyttes ved horisontale løft. Den har ti opphengspunkter, fem på hver side av brukeren, hvilket gir brukeren en jevnt fordelt støtte under hele kroppen. StretcherSling er utformet for å tilgodese behov for å forflytte brukere i liggende stilling.

StretcherSling inngår i en serie av ulike modeller av løfteseler. Valget av modell og materiale bestemmes av brukerens funksjoner og til hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics løfteseler og løftere inngår i SystemRoMedic, et helhetssyn om forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Foreta regelmessige funksjonskontroller av løfteselen, alltid etter hver vask. Kontroller at materialet er helt fritt for skader og at det ikke har blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



Les alltid bruksanvisningen

Les alltid bruksanvisningen for samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning.

La aldri brukeren være alene under løftemomentet.

Kontroller at samtlige løftebånd er korrekt plassert på StretcherBar.

Kontroller festeanordningen på løftebøylen samt at avkrokningsvernets funksjon er korrekt applisert.


Juster med likevektskontrollen for å oppnå likevekt ved behov.

Manual nr: 00865No ver. 3 090312

EAN nr: 73 31769 00874 1


RoMedic[®]

Produktbeskrivelse av StretcherSling og StretcherBar

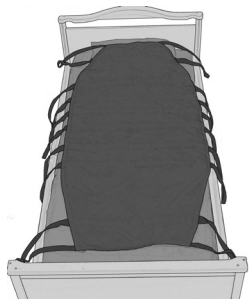


StretcherSling er laget i ett stykke (177 cm langt), har fem løftebånd som er gjennomgående under brukeren og gjør at vekten fordeles på ti løftepunkter.


StretcherSling er spesielt utformet til StretcherBar og ingen andre kombinasjoner anbefales.

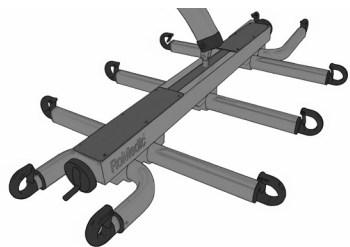

StretcherBar er produsert i aluminium og utformet med en midtdele som har innebygd likevektskontroll/regulering. Den har også fem aluminiumsprofiler med løftekroker i hver ende. Se manual for StretcherBar.

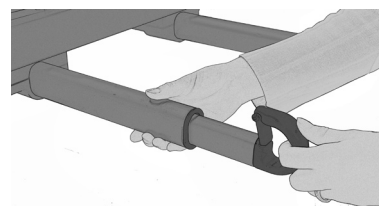

Løftekrokene er utstyrt med avkrokningsvern. Alle løftearmene kan ved behov reguleres etter brukers bredde, og trekkes enkelt ut før man starter løftet. Se manual for StretcherBar.

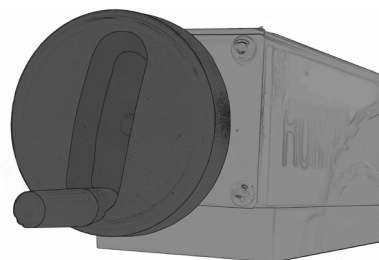

Den midtre delen på StretcherBar inneholder en innebygd likevektskontroll. Denne reguleres enkelt gjennom en hendel på begge sidene som man roterer for å gi ønsket likevekt. Se manual for StretcherBar.

Plassering og fjerning av StretcherSling skal bare skje når brukeren ligger:




1. Vend brukeren mot deg. Plasser Stretcher-Sling med merkelappen mot underlaget og midtlinjen langs ryggraden på brukeren. Den øvre kanten av StretcherSling skal gi støtte til hodet.


Plasser løfteselens kant så langt inn under brukeren som mulig. Før så løftehempene under brukeren slik at du når dem når du vender brukeren tilbake på StretcherSling.



2. Vend brukeren tilbake på løfteselen og dra frem selen på den andre siden ved hjelp av løftebåndene.

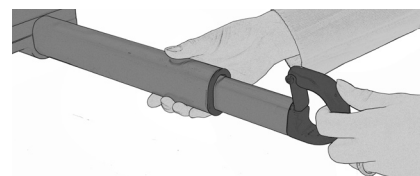

3. Ved behov: Juster bredden på StretcherBar ut fra brukers bredde ved å trekke ut løftekrokene. Hekt løftehempene på bøylen.

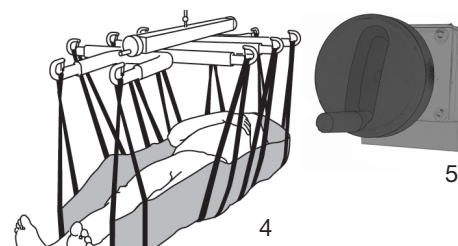


4. Kjør løfteren opp til samtlige løftebånd er stramme. Stopp opp for å kontrollere at alt er i orden før du fortsetter å løfte brukeren helt fra underlaget.

5. Hvis det ikke er likevekt når brukeren løftes fra underlaget, kan du regulere dette ved å skru på likevektskontrollen.

Fjerning av løfteselen når brukeren ligger:



1. Frigjør samtlige løftehemper fra løfteren og sett den til side. Vend brukeren mot deg og fold StretcherSling mot underlaget slik at den glir mot seg selv.

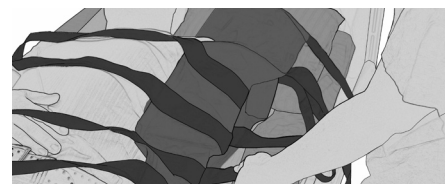

2. Tøyet glir lett mot sin egen overflate når du drar ut StretcherSling etter at du har vendt brukeren tilbake.

Alternativ plassering av StretcherSling:

Hvis situasjonen ikke tillater vending av brukeren, kan man først plassere to RoMedic ReadySheet under brukeren (nedenfra og opp) og så trekke StretcherSling mellom de glatte materialene.

Materiale:

Polyamid: Slitesterkt materiale med lite friksjon.

Plastret nett: Kan desinfiseres med sprit og anbefales til bruk ved bading eller dusjsituasjoner.

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for lang levetid på materialet.

RoMedics produkter utvikles kontinuerlig. Derfor forbeholder vi oss retten til endringer i produktene uten varsel i forkant. Kontakt leverandøren for informasjon, råd og eventuelle oppdateringer.

For spørsmål om produktet ta kontakt med Handicare for utprøving, råd eller annen informasjon. Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.handicare.no. Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: www.handicare.no

Produsent:

RoMedic AB
Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN
Tel: +46 (0)8-594 773 33
Faks: +46 (0)8-594 773 44
E-post: office@romedic.com
www.romedic.com

Leverandør:

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss
Tel: 03250
Faks: 85 02 88 22
E-post: post@handicare.no
www.handicare.no

RoMedic®