

Max: 135 kg/297 lbs

EasyGlide benyttes ved liggende forflytninger mellom seng og røntgenbord/operasjonsbord/brits/dusjvogn, og den skal alltid benyttes i par. Av sikkerhetsmessige hensyn bør EasyGlide ha solid underlag på hver siden når man gjør en forflytning mellom seng og brits.

SystemRoMedic er en serie med ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av hjelpemiddel avgjøres ut fra forflytningssituasjonen og brukerens funksjonsnivå og behov.



## Kontroll av funksjon

### Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



## Les alltid bruksanvisningen


Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning

Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet.




## Kontroll av funksjon

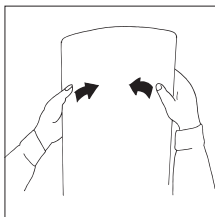


Kontroller materialstyrken i EasyGlide ved å bøye forsiktig i skiven. Skiven skal ha god spenst og føles fast. Kasser EasyGlide om materialstyrken har avtatt.

## Sikkerhet

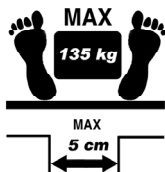

EasyGlide bør ha solid underlag på hver side når man gjør en forflytning mellom seng og brits. Maksimumsvekten på 135 kg gjelder ved en avstand på maksimum 5 cm.

## Plassering

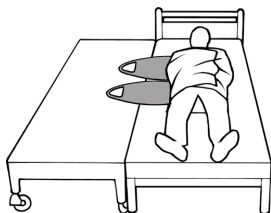

Glideskiven plasseres under hoft og skulder.

Brukeren lenes mot den ene siden. Benytt gjerne et stikkklaken for en enklere forflytning.

Skyv inn glideskiven under brukeren mellom laken og stikkklaken. Trykk glideskiven noe ned i madrassen og skyv på.

Kontroller at tyngdepunktet for hoft og skulder ligger midt på glideskiven.


OBS: Om to eller flere glideskiver benyttes, vær oppmerksom på at huden ikke kommer i klem mellom glideskivene.

## Forflytning seng til seng



1. Forflytning på glideskivene. Glideskiven plasseres midt mellom begge liggeflatene. Med et stikkklaken får medhjelperne en forlengt arm og kan jobbe med bedre arbeidsstilling.

Vær oppmerksom på at glideskivene ligger midt mellom begge underlagene og at avstanden er maksimum 5 cm. Len brukeren mot glideskivene og dra i stikkklakenet for å forflytte brukeren.

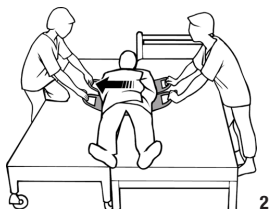


2. Forflytningen kan også utføres ved å trekke i glideskiven.

Glideskiven plasseres midt under brukeren.

Den ene medhjelperen trekker mot seg selv, mens den andre medhjelperen bistår ved å skyve på glideskiven.

## Høyere opp i seng

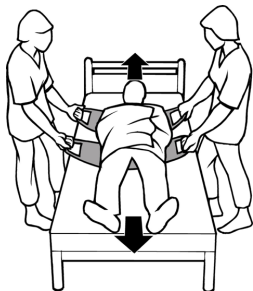

Forflytning høyere opp i sengen med to glideskiver. Glideskivene plasseres under brukerens hoft og skuldre. Medhjelpene står i en gangstilling på hver side av sengen, tar tak i håndtakene og gjør et steg bakover/oppover.

## Fjerning

Glideskivene fjernes ved å ta tak i håndtakene og trekk så ut glideskivene. For å unngå at brukerens kropp endrer leie når man fjernes hjelpemiddelet, kan man holde i mot når glideskiven trekkes ut.

## Materiale:

Polyethen

## Vedlikehold:

EasyGlide rengjøres med vann og desinfiseringsmiddel.

Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se [www.romedic.com](http://www.romedic.com) for en komplett distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra vår hjemmeside: [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

RoMedic AB

Veddestav. 15, Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

E-mail: [office@romedic.com](mailto:office@romedic.com)

**RoMedic**<sup>®</sup>  
A company in the Handicare Group