

50 x 60 cm



25 x 60 cm



EasySlide benyttes ved vendinger i seng, overflytning mellom seng og rullestol/toalett samt høyere opp i sengen. EasySlide er laget som en sylindereformet vattert matte med et friksjonsreducerende materiale på innsiden.

EasySlide inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.





Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.



Test av friksjon

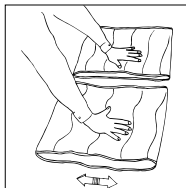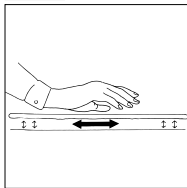

Test EasySlides friksjon ved å rulle den. Vær oppmerksom på hvor lett den glir. Hvis mulighet, sammenlign med en ny EasySlide.

Plassering av EasySlide

Plasser EasySlide under halve setet, alternativt skulder. Ved forflytning lenes hele kroppstyngden over på glidematten. Trekk i nedre del av glidematten ved fjerning.

Bruk av EasySlide



1

1. EasySlide kan med fordel benyttes i overflytninger til og fra rullestol. Kompletter gjerne med en EasyGlide.



2

2. EasySlide kan benyttes under skuldrene som et friksjons-reducerende hjelpemiddel for å forenkle en forflytning høyere opp i sengen.



3

3. EasySlide kan benyttes under hoftene for å forenkle en forflytning i sideleie.

Aktive brukere kan selv benytte EasySlide, men kan også benyttes av medhjelpere der man jobber med mindre aktive brukere.



4

4. Ved overflytninger mellom seng/brets og dusjvogn skal aldri avstanden være større en 5 cm.

Obs!

Husk alltid å låse hjulene.



5

5. La aldri EasySlide ligge igjen under brukeren, eller la brukeren ligge for nær kanten, siden risikoen for utglidning er stor.

Materiale:

Polyester, microfiber, polyamid

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

Storlek:

2010	50 x 60
2015	25 x 60
2020	50 x 60 (microfiber)

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group