

20x60 cm

20x50 cm



FlexiMove benyttes som støtte og hjelp ved ulike forflytningssituasjoner. Vanlige forflytnings-situasjoner der FlexiMove gner seg godt er overflytning, oppreisning og høyere opp i sengen. FlexiMove er laget med to ulike håndtakslengder for å muliggjøre en god arbeidsstilling. FlexiMove produseres i to materialalternativer på innsiden; nylon og polyester. Nylon er et antisklimateriale som er enkelt å desinfisere ved behov. Polyester er mykt og behaglig mot kroppen.

FlexiMove inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet, alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt og uskadd. Ved minste tegn på slitasje skal produktet byttes ut.




Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.



Funksjonstest av FlexiMove

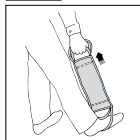

Funksjonstest FlexiMove regelmessig. Sett en fot i et av håndtakene og trekk hardt i et av håndtakene på motsatt side. Gjenta prosessen til alle håndtakene er grundig testet.

Bruk av FlexiMove





Overflytning:

Ved en overflytning mellom for eksempel rullestol og seng, bør også en EasyGlide og evt et EasyBelt/FlexiBelt benyttes (1).




Oppreising:

Ved oppreising kan FlexiMove benyttes til å føre beina over sengekanten (2) og deretter som støtte bak ryggen/setet (4).

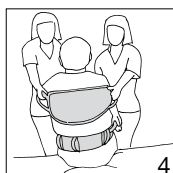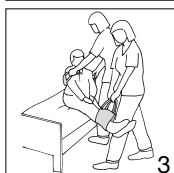

Er brukeren i behov av to medhjelpere, bistår den ene ved beina og den andre ved overkroppen (3). I selve oppreisingen jobber medhjelperne på hver sin side og velger det håndtaket som gir best arbeidsstilling (4).

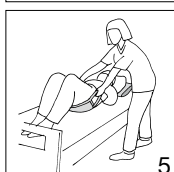

Høyere opp i sengen:

For å hjelpe brukeren høyere opp i sengen benyttes FlexiMove under setet (5).

Det kan også være hensiktsmessig å benytte et friksjonsreducerende hjelpemiddel under skuldrene, for eksempel EasySlide (6).

Materiale:

Polyamid, nylon

Storlek:

3012	20 x 60 nylon
3020	20 x 50 polyester
3030	20 x 60 polyester

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon. Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group