



IncoSheet er en vaskbar inkontinensbeskyttelse som plasseres i sengen eller som beskyttelse på rullestolputen. Materialet er høyabsorberende og fordeler væsken over en større overflate. Stoffet på produktets overside gjør at overflaten føles tørr og behaglig å ligge på. Det rye stoffet på undersiden gjør at den ligger bedre på plass i sengen.

IncoSheet inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet, alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt og uskadd. Ved minste tegn på slitasje skal produktet byttes ut.



Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.

Plassering av IncoSheet




IncoSheet plasseres i sengen med den lyse quiltede siden opp. IncoSheet finnes i fire ulike størrelser; to varianter med en kortere del inkontinensbeskyttelse, hvorav den ene har stoff på sidene for å kunne brettes inn under madrassen. En annen variant har en lengre inkontinensbeskyttelse og en mindre variant er spesialtilpasset for rullestoler.




75x90 cm

De to kortere inkontinensbeskyttelsene er tilpasset brukere som selv klarer vendinger, men kan også benyttes sammen med et forflytningshjelpemiddel ovenpå. I og med at forflytningshjelpemiddelet plasseres ovenpå IncoSheet, ligger IncoSheet på samme sted under brukeren. Etter en evt vending vil produktet fortsatt beskytte underlaget.

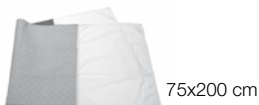

75x200 cm

IncoSheet med den lange inkontinensdelen benyttes først og fremst av brukere som er i behov av hjelp ved vendinger. Denne størrelsen av IncoSheet kan legges ovenpå et forflytningshjelpemiddel siden den har ekstra lang inkontinensdel. Produktet vil fortsatt beskytte underlaget også etter en vending.

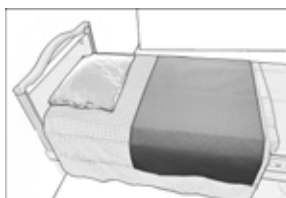

75x150 cm



40x83 cm

IncoSheet 40x83 er mindre for å kunne plasseres i rullestolen for å beskytte sitteputen.

Observer!

IncoSheet skal ikke benyttes som et stikkilaken, men legges ovenpå et laken, stikkilaken eller forflytningshjelpemiddel ved behov.

Materiale:

Polyester, bomull

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



IncoSheet kan vaskes og tørkes ved høye temperaturer.

Bruk ikke skylle- eller blekemiddel (eksempelvis klorholdige midler).

IncoSheet klarer mer enn 100 vask.

Storlekar

1530	75 x 90
1531	75 x 200 med stoff på sidene
1532	75 x 150
1533	40 x 83

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com

www.romedic.com

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group