



Max: 150 kg/330 lbs
200 kg/440 lbs

OneWaySlide benyttes ved posisjonering lengre bak i stolen/rullestolen. OneWaySlide er laget slik at den glider lett bakover, men ikke framover. For å forenkle for medhjelperen er OneWaySlide laget med håndtak på sidene samt bak. Produktet blir værende igjen under brukeren. OneWaySlide kommer i flere størrelser.

OneWaySlide inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.




Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.



Kontroll av funksjon

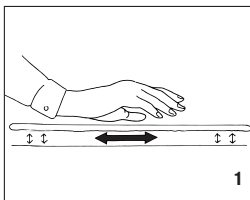


Test OneWaySlides friksjon/bremsfunksjon ved å rulle den. Vær oppmerksom på hvor lett den gli. Hvis mulighet, sammenlign med en ny OneWaySlide.




Test håndtakenes styrke og sømmer ved å dra i håndtakene i ulike retninger.

Plassering av OneWaySlide

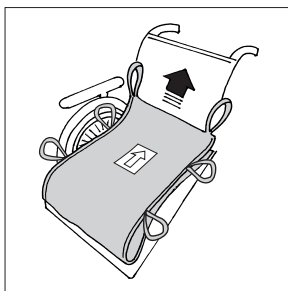


Plasser OneWaySlide slik at den åpne delen er bak i rullestolen.

Legg den øvre delen slik at den kryper litt opp på rullestolryggen. Dette for å gjøre det enkelt for medhjelperen å få tak i håndtakene.

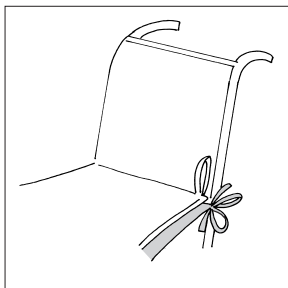


Knyt OneWaySlide fast i rullestolens bakre rør.


Alternative gripemuligheter

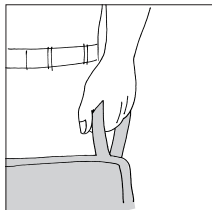


Medhjelperen kan enten gripe håndtakene som på vanlig måte (1) eller først tre håndtaket rundt håndledet (2). Tenk alltid på å jobbe med bøyde knær, rett rygg og strake armer. Benytt tyn-
gdeoverføringsprinsippet.

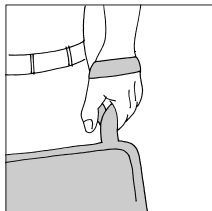

Bruk av OneWaySlide

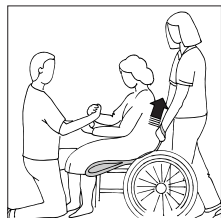

1. Posisjoneringen forenkles om brukeren kan lene seg fremover. Om brukeren ikke kan lene seg selv kan en medhjelper bistå forfra, og samtidig virke støttende ved dårlig sittebalanse.

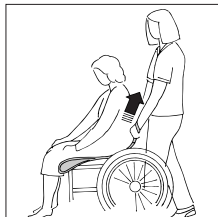

2. Om brukeren kan lene seg frem på egenhånd og har god sittebalanse, holder det med en medhjelper.

Grip passende håndtak og trekk brukeren bakover ved å dra OneWaySlide oppover langs ryggdelen på rullestolen.



3. Om brukeren er tung eller om stolen har høy rygg, kan to medhjelpere jobbe på hver sin side av stolen. Vær samspilte.

Lag deg god rutiner med å heve brukerens føtter fra gulvet. Dette gjør at lårene er fri fra underlaget og du får en enklere posisjoneringen.

Materiale:

Polyester, polyamid, bomull

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

Størrelse og maksimumslast:

2074	110 x 30 cm	150 kg
2075	130 x 40 cm	150 kg
2076	130 x 45 cm	150 kg
2077	130 x 55 cm	200 kg

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group