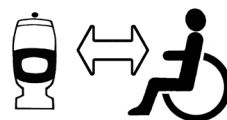
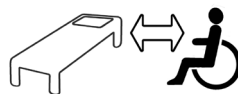


TurnTable

SystemRoMedic

**Max:**

5083: 135 kg/297 lbs

5084: 250 kg/551 lbs

5085: 135 kg/297 lbs

TurnTable benyttes sammen med FlexiBelt/EasyBelt for sittende overflytninger mellom rullestol og seng, toalett eller stol/lenestol. Av sikkerhetsmessige hensyn skal alltid TurnTable benyttes sammen med FlexiBelt/EasyBelt. TurnTable finnes i to ulike størrelser; en med håndtak for hendig transport og en variant uten håndtak for trange rom.

TurnTable inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.

Spesielle bruksområder og forutsetninger

Når man skal forflytte med TurnTable må brukeren kunne;

- belaste sine egne bein
- reise seg opp og kunne balansere (evt. med støtte)
- kunne motta og forstå instruksjoner

Plassering og bruk av TurnTable



TurnTable legges på gulvet inntil brukeren. Lås TurnTable ved oppreisning gjennom å plassere fotbladet på dreieskiven og samtidig har helen i gulvet. Medhjelperen kan styre dreiningen ved å skyve med fremre del av foten og bremse med helen. Lås TurnTable som beskrevet over når brukeren skal sette seg ned igjen.



I overflytninger fra seng til rullestol, plasseres rullestolen så nær sengen som mulig slik at forflytningen blir så kort som mulig.



I forflytninger til toalett plasseres rullestolen så nær sengen som mulig slik at forflytningen blir så kort som mulig.

Buksene kles av og på mye enklere når brukeren har lettet fra sitsen. Jobb gjerne to og to.

Vedlikehold:

TurnTable rengjøres for hånd og kan desinfiseres.

Storlekar

5083	38 cm i diameter
5084	45 cm i diameter, håndtak
5085	38 cm i diameter, håndtak

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utproving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group