

WendyLett er et glidelaken som forenkler posisjonering og vendinger i seng. WendyLett har snor og festeordning som festes til madrassen. Det res i sengen som et vanlig laken og kan kombineres med RoMedics stikkklaken, WendyLett 2Way eller 4Way. WendyLett lages i flere ulike størrelser og modeller.

WendyLett inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon



Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.

Plassering

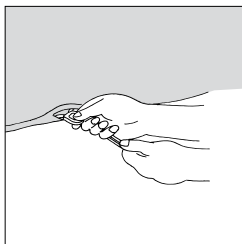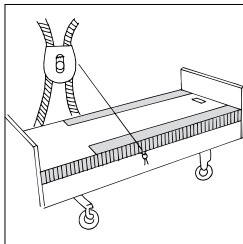


Plasser WendyLett med den glatte overflaten midt i seng-en. Fest den i madrassen ved å trekke i snoren og lås den fast med låseanordningen på begge sider av madrassen. Sjekk at madrassfutteralets rue sider er jevnt fordelt på begge sider av sengen. Disse områdene reduserer risikoen for utglidning av sengen.

Materiale



1

1. Glidelakenene, WendyLett, kommer i grått materiale med hvite striper. Stripene indikerer glideretningen.

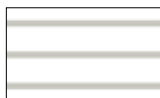

2


2. Stikkklakenet, WendyLett 2Way, kommer i hvitt materiale med grå striper. Stripene indikerer trekkretningen.




3

3. Stikkklakenet, WendyLett 4Way, kommer i har et grårutet mønster og glidemateriale på undersiden. Stripene indikerer trekkretningen.

Bruk

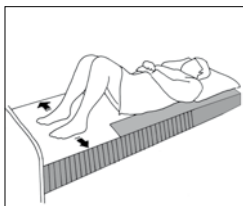

1. Glideflaten ved føttene går helt ut til madrasskanten for å forenkle forflytningen av føttene, slik at brukeren kan sette seg på sengekanten.

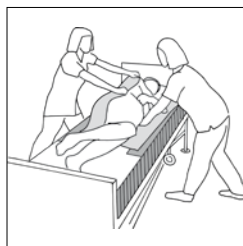

2. Med WendyLett2Way kan brukeren snu seg selv uten å gli ned om hodeenden på sengen heves. Om brukeren behøver hjelp eller er tung i vendingen, kan WendyLett2Way fungere som et stikkklaken for medhjelperen. Med WendyLett4Way kan brukeren hjelpes både høyere opp i sengen samt i sideleie.

Materiale:

Polyester, bomull, satin

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

Storlekar:

1641 200 x 90
1651 200 x 105

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon. Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group