


WendyLett^{2WAY}
SystemRoMedic

WendyLett^{4WAY}
SystemRoMedic

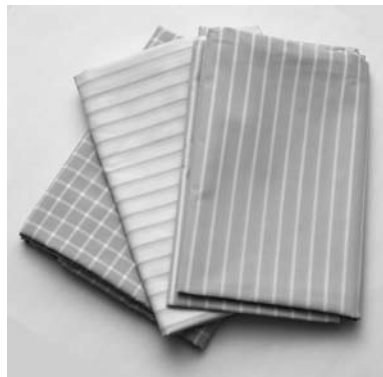

WendyLett 2Way
90x180 100x200
140x200



WendyLett 4Way
140x200 200x200



WendyLett2Way og 4Way er to ulike stikkklaken som benyttes sammen med et glidelaken, WendyLett. WendyLett 2Way benyttes for forflytninger i sideleie og WendyLett 4Way benyttes for forflytninger i både sideleie og opp eller ned i sengen. WendyLett 4Way har glidemateriale på undersiden og spesielt egnet for tunge brukere. Produktet kommer i flere ulike størrelser.

WendyLett2Way og 4Way inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon


Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt, uskadd og at stoffet ikke er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.




Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå ubehag gjennom å benytte produktet korrekt.

Plassering

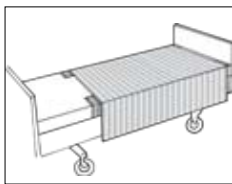

WendyLett 2Way

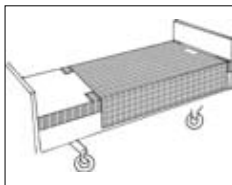

WendyLett 4Way

WendyLett plasseres med den glatte overflaten midt i sengen og med WendyLett2Way oppå. Etter vending kan glidebevegelsene bremses ved at WendyLett2Way brettes inn under madrassen på begge sider av sengen.

På WendyLett 4Way finnes en merkelapp som viser hvilken side som skal plasseres oppover i sengen. Etter vending kan glidebevegelsene bremses ved at WendyLett4Way brettes inn under madrassen på begge sider av sengen.

Vending med WendyLett 2Way



Gjennomfør vendingen ved å ta tak i stikkklakenet ved hoft og skuldre. Fyll hele hånden med mye tøy for bedre ergonomi.



Jobb med strake håndledd og tyngdeoverføring ved å lene deg bakover.



Vending med stikkklaken kan gjøres av to medhjelpere, der man samarbeider slik at den ene trekker i stikkklakenet (som vist over) og den andre trykker noe ned ved skuldre og hoft, og samtidig skyver i fra.



Vend brukeren. Etter vendingen låses glideevnen ved at stikk-lakenet vikles inn under madrassen på begge sidene.

Vending med WendyLett 4Way



Stikkklakenet WendyLett4Way har et glidmateriale på undersiden er spesielt utviklet for tunge brukere. Fremgangsmåten ved vending er den samme som for WendyLett2Way (over).

Etter vendingen låses glideevnen ved at stikk-lakenet vikles inn under madrassen på begge sidene.



Før stikkklakenet festes under madrassen, skal eventuelle ujevnheter under brukeren slettes ut for å unngå sår. Dette kan gjøres ved at man trekker diagonalt i stikkklakenet fra hver side. La aldri brukeren være alene uten å sette opp sengegrindene.

Høyere opp i sengen med WendyLett 4Way



For forflytninger høyere opp i sengen tar man tak i stikkklakenet ved skulderpartiet på begge sider av brukeren, står i gangstilling og tar et skritt bakover.



Man kan unngå at brukeren glir nedover i sengen ved å brette stikkklakenet slik at det ligger dobbelt under brukeren ved setet.

Sitte opp i sengen med WendyLett 4Way



1



2



3

Man kan unngå at brukeren glir nedover i sengen, også når man sitter oppreist med et WendyLett4Way under seg.

Brett inn en del av stikkklakenet slik at det ligger dobbelt under brukeren ved setet (1). Brett deretter stikkklakenet inn under madrassen, men bare ved hoftepartiet (2). Når man så hever hodeenden av sengen, fungerer stikkklakenet som en bremseflate (3).

Sette seg opp på sengkanten med WendyLett 4Way




Stikkklakenet WendyLett4Way kan også benyttes som et hjelpemiddel når en bruker skal sette seg opp på sengkanten.




Ta tak i stikkklakenet på begge sider av brukeren like nedenfor skulderpartiet. Ha godt med tøy i hendene for et godt grep. En medhjelper bistår ved føttene når brukeren vendes rundt og settes opp på senge-kanten.

Materiale

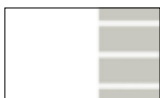

1

1. Glidelakenene, WendyLett, kommer i grått materiale med hvite striper. Stripene indikerer glideretningen.

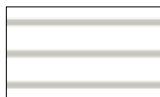

2

2. Stikkklakenet, WendyLett 2Way, kommer i hvitt materiale med grå striper. Stripene indikerer trekkretningen.



3

3. Stikkklakenet, WendyLett 4Way, kommer i har et grårutet mønster og glidemateriale på undersiden. Stripene indikerer trekkretningen.

Observer



Vår oppmerksom på risiko for utglidning. La aldri brukeren være alene uten å sette opp sengegrindene.

Materiale:

Polyester, bomull, satin

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

Storlekar:

1620	90 x 180 2Way (vitt)
1631	100 x 200 2Way
1636	140 x 200 2Way
1637	140 x 200 4Way
1647	200 x 200 4Way

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com

www.romedic.com

Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: <http://www.romedic.com>

RoMedic AB

Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-594 773 33

Fax: +46 (0)8-594 773 44

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group